



SQHE S.A.C.
RUC: 20510400152

📍 Av. Edo. de Habich n° 267 - Urb. Ingeniería piso 3 Lima - Lima - S.M.P.
📞 999 487 878 - 921 843 852 ✉️ productos@sqhesac.com 📘 [sqhesolucion](https://www.facebook.com/sqhesolucion)

Comercialización y distribución de Materiales para el bienestar de la Salud, Higiene y Seguridad Integral Institucional .



www.sqhesac.com.productos

Barra de Seguridad de Acero Inoxidable (Modelo P)

FICHA TÉCNICA

Barra de seguridad de acero inoxidable diseñada para brindar soporte y estabilidad en baños, especialmente para personas con movilidad reducida o que requieren apoyo adicional. Su diseño en forma de "P" permite una sujeción cómoda y segura en inodoros, lavabos y otras áreas del baño.



-Características Técnicas

.Material: Acero inoxidable 304 de alta calidad.

.Acabado: Satinado.

.Diámetro del tubo: 32 mm.

.Forma: "P".

.Dimensiones:


.Altura: 70 cm.

.Largo: 70 cm.

.Instalación: Atornillado a la pared y piso

.Uso: Urinarios, inodoros, lavabos y otras áreas del baño.

.Accesorios incluidos: Kit de fijación (tornillos y tarugos).

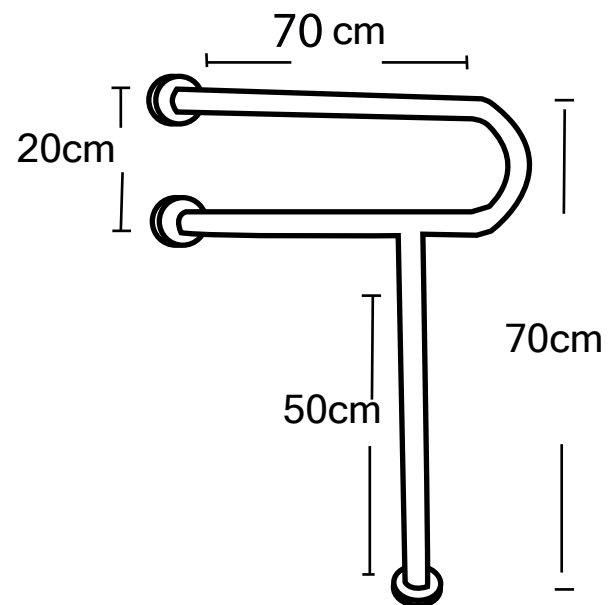

-Beneficios

.Seguridad: Proporciona un apoyo firme y seguro, reduciendo el riesgo de caídas.

.Capacidad de carga: 199.00 kg.

.Durabilidad: El acero inoxidable garantiza una larga vida útil y resistencia a la corrosión.

.Higiene: La superficie lisa y no porosa facilita la limpieza y desinfección.

.Estética: El acabado satinado le otorga un aspecto moderno y elegante.

.Versatilidad: Su diseño en "P" permite su uso en diversas áreas del baño. están diseñadas con una forma única que ofrece soporte horizontal y vertical en un solo accesorio. La sección horizontal proporciona un asidero para estabilidad, mientras que la parte vertical ofrece soporte adicional para levantarse o estabilizarse.





-Facilidad de instalación: Incluye todos los accesorios necesarios para una instalación sencilla.

Instrucciones de Instalación

.Localización: Determine la ubicación adecuada, teniendo en cuenta la altura y el alcance del usuario, lo otro tener en cuenta el espacio en si para no tener dificultad al momento de desplazarse.

.Marcado: Marque los puntos de fijación en la pared.

.Perforación: Realice los agujeros en la pared con un taladro y una broca del tamaño adecuado.

.Fijación: Introduzca los tarugos en los agujeros y atornille la barra a la pared.

-Mantenimiento

.Limpiar regularmente con un paño húmedo y un detergente suave. Evitar el uso de productos abrasivos.

-Recomendaciones: Es recomendable que la instalación sea realizada por un profesional, para asegurar una correcta fijación. Realizar una adecuada instalación nos garantizara a tener una barra cumpliendo sus funciones.

Para la limpieza de la barra usar solo agua y jabón aplicando con una esponja o paño, frotar hasta que quede limpio.

-A tener en cuenta:

Instalar solo en paredes de material noble, no instalar en paredes huecas o paneles de poco soporte, no sobrecargar, respetar carga máxima, alejar siempre del fuego directo, no limpiar con ácidos o material abrasivo.